

comco

BRUKSANVISNING

# Solatium Distansmadrass

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**  
2013LK0003 AITEX  
Tested for harmful substances.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)



# Innehållsförteckning

Säkerhetsföreskrifter.....	3
CE-Märkning.....	3
Introduktion.....	3
Uppackning.....	3
Användning.....	3
Fakta Solatium Distansmadrass.....	4
Storlekar.....	4
Rengöring och rekonditionering.....	4
Garanti.....	4
Destruering.....	4
Retur och reklamationer.....	4
Tillverkare.....	5

## Säkerhetsföreskrifter

- Läs föreskriften noggrant och spara den för framtida bruk.
- Stick inte in vassa föremål i madrassen.
- Använd endast madrassen för det den är avsedd till enligt instruktioner i denna manual.
- Undvik skador genom att hålla madrassen borta från varma källor eller eld.
- Placera madrassen noggrant och kontrollera att rätt storlek används.
- Madrassen ska användas så att den inte blir skadad eller klämd

## CE-Märkning

Solatium Distansmadrass är CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC medicintekniska produktdirektivet klass 1. Med CE-märkning säkerställer COMCO AB att produkten uppfyller kraven i lagen om medicintekniska produkter och Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter. Enligt dessa föreskrifter är vi skyldiga att rapportera olyckor och tillbud som rör våra produkter. Vi ber er därför att rapportera till COMCO AB om en olycka eller tillbud inträffar som rör våra produkter.

## Introduktion

Solatium Distansmadrass används i kombination med en förebyggande eller behandlande madrass och placeras under en annan madrass.

## Uppackning

Våra madrasser levereras rullpackade/komprimerade i återvinningsbar plast. Innan påbörjande av uppackning kontrollera att madrassen ej är skadad. Avlägsna sedan plasten försiktigt. Användning av vassa föremål vid öppnandet bör undvikas då man riskerar att skada madrassen. Efter avlägsnandet av plasten bör madrassen placeras i plant läge för att återhämta sin normala ursprungliga form. Madrassen går även att använda direkt efter uppackning.

## Användning

Solatium Distansmadrass används i kombination med en förebyggande eller behandlande madrass och placeras under annan madrass.

Madrassen har droppskyddad dragkedja på tre sidor med ett avtagbart madrassfodral som är slitstarkt och avtorkningsbart.

## Fakta Solatium Distansmadrass

Fyllning 6cm Kallsaum 35kg/m<sup>3</sup>

Hygienöverdrag 200g/m<sup>2</sup>

Förpackning: Rullpackad i klar plast

Färg: Blå

Etikett med anvisningar om tvätt, brukarvikt, artikelnummer, artikelnamn, storlek, och tillverkningsdatum är placerad på insidan av hygienfodralet.

## Storlekar

Solatium Distansmadrass finns i följande storlekar:

90x200x6cm, artikelnummer SDM-3506-090200

105x200x6cm, artikelnummer SDM-3506-105200

120x200x6cm, artikelnummer SDM-3506-120200

Specialstorlekar kan även tillverkas efter önskemål

## Rengöring och rekonditionering

Överdraget ska rengöras och rekonditioneras för att undvika eventuell smittspridning.

Etikett med tvätthanvisningar är placerad på insidan av hygienfodralet. Hygienöverdrag tvättas i max 95 °C. Överdraget kan även torktumlas.

Använd en fuktig trasa med ett skonsamt rengöringsmedel för att rengöra ytan. Torka sedan av den fuktiga ytan med en torr trasa. Vid behov använd även desinfektionsmedel.

## Garanti

2 års garanti


## Destruering

Solatium Distansmadrass samt emballage sorteras under brännbart avfall.

## Retur och reklamationer

Alla avvikelser skall rapporteras till COMCO AB. Reklamation får göras först när avvikelsen är rapporterad till oss. Returnering sker då enligt våra instruktioner. Vid transportskadat gods skall även anmälan göras till berört transportbolag. När reklamationen är COMCO tillhanda sker återrapportering till kunden gällande hur reklamationen skall åtgärdas.

## Tillverkare

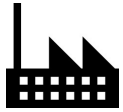

**COMCO AB**

**Kontakt:**

Telefon: 040 45 47 87

Fax: 040 45 47 99

E-post: [info@comco.se](mailto:info@comco.se)

**Postadress:**

COMCO AB

Brädgårdsvägen 28

236 32 Höllviken

**Godsadress:**

COMCO AB

Radiatorvägen

Gate 8

283 43 Osby

**Support:**

Helgfria vardagar 8.00-16.30