

comco

BRUKSANVISNING

Stratum Sense

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
2013LK0003 AITEX
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

CE



Innehållsförteckning

Säkerhetsföreskrifter.....	3
CE-Märkning.....	3
Introduktion.....	3
Användning.....	3
Fakta Stratum Sense.....	4
Storlekar.....	4
Tillbehör.....	4
Rengöring och rekonditionering.....	4
Kontroll av madrass.....	4
Destruering.....	5
Retur och reklamationer.....	5
Garanti/Livslängd.....	5
Övrig information.....	5
Handhavande vid evakuering med Stratum Evakueringsöverdrag.....	5
.....	6
Tillverkare.....	6

Säkerhetsföreskrifter

- Läs föreskriften noggrant och spara den för framtida bruk.
- Stick inte in vassa föremål i madrassen.
- Använd endast madrassen för det den är avsedd till enligt instruktioner i denna manual.
- Undvik skador genom att hålla madrassen borta från varma källor eller eld.
- Placera madrassen noggrant och kontrollera att rätt storlek används.
- Madrassen ska användas så att den inte blir skadad eller klämd

CE-Märkning

Stratum Sense är CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC medicintekniska produktdirektivet klass 1. Med CE-märkning säkerställer COMCO AB att produkten uppfyller kraven i lagen om medicintekniska produkter och Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter. Enligt dessa föreskrifter är vi skyldiga att rapportera olyckor och tillbud som rör våra produkter. Vi ber er därför att rapportera till COMCO AB om en olycka eller tillbud inträffar som rör våra produkter.

Introduktion

Våra madrasser levereras rullpackade/komprimerade i återvinningsbar plast. Innan påbörjande av upppackning kontrollera att madrassen ej är skadad. Avlägsna sedan plasten försiktigt. Användning av vassa föremål vid öppnandet bör undvikas då man riskerar att skada madrassen. Efter avlägsnandet av plasten bör madrassen placeras i plant läge för att återhämta sin normala ursprungliga form. Madrassen går även att använda direkt efter upppackning.

Användning

Stratum Sense är en ersättningsmadrass och placeras vid användning direkt på sängbotten. Madrassen är lämplig att använda i vård- och omsorgsmiljö samt i hemmiljö för att förebygga och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 2. Stratum Sense har droppskyddad dragkedja på tre sidor med ett avtagbart madrassfodral som är slitstarkt och avtorkningsbart. Hygienöverdraget är även försett med bärhandtag tillverkad i samma avtorkningsbara material som madrassen.

Fakta Stratum Sense

Profilerad Kallskum 52kg/m³

Hygienöverdrag 200g/m²

Förpackning: Rullpackad i klar plast

Rekommenderad brukarvikt 0-150kg

Färg: Blå

Etikett med anvisningar om bl.a. leverantörsnamn, tvätt, brukarvikt, artikelnummer, artikelnamn, storlek, och tillverkningsdatum är placerad på insidan av hygienfodralet. Madrassen är även märkt med lägesmärkning.

Storlekar

Stratum Sense finns i följande storlekar:

85x200cm, artikelnummer SS-08520014

90x200cm, artikelnummer SS-09020014

90x210cm, artikelnummer SS-09021014

105x200cm, artikelnummer SS-10520014

120x200cm, artikelnummer SS-12020014

Tillbehör

Tillbehör till Stratum Sense som går att beställa.

Hygienöverdrag

Hygienöverdrag med evakueringsfunktion

Rengöring och rekonditionering

Överdraget ska rengöras och rekonditioneras för att undvika eventuell smittspridning.

Etikett med tvättanvisningar är placerad på insidan av hygienfodralet.

Hygienöverdrag tvättas i max 95 °C. Överdraget kan även torktumlas.

Använd en fuktig trasa med ett skonsamt rengöringsmedel för att rengöra ytan.

Torka sedan av den fuktiga ytan med en torr trasa. Vid behov använd även

desinfektionsmedel. Efter rengöring kontrollera hygienöverdraget. Är

hygienöverdraget skadat ska det bytas ut. Vid skadat hygienöverdrag kontrollera även att ingen vätska trängt ner till madrasskärnan.

Kontroll av madrass

Kontrollera att madrassöverdraget sitter korrekt på madrassen. Säkerställ att madrassöverdragets yta är hel samt inspektera sömmar och dragkedja. Reglera sängen så att höften är i nivå med madrassen. Kontrollera skummet genom att lägga händerna ovan på varandra och pressa ner lätt i madrassen. Kontrollera hela madrassen, från huvudända till fotända och känn efter så att madrassen fjädrar tillbaka och att motstånd finns. Sviktar inte madrassen tillbaka när pressen lättar finns det risk att tryckdelande förmåga har försämrats. Är du

osäker hur det ska kännas, jämför med hur en madrass känns som inte är använd eller genom att känna efter vid madrassens hörn (ungefär ca 20cm från själv hörnet) där madrassen ej har blivit så hårt belastad. Det är normalt att belastade områden känns mjukare. Sängbotten ska inte kännas

Destruering

Stratum Sense samt emballage sorteras under brännbart avfall.

Retur och reklamationer

Alla avvikelser skall rapporteras till COMCO AB. Reklamation får göras först när avvikelserna är rapporterade till oss. Returnering sker då enligt våra instruktioner. Vid transportskadat gods skall även anmälan göras till berört transportbolag. När reklamationen är COMCO tillhanda sker återrapportering till kunden gällande hur reklamationen skall åtgärdas.

Garanti/Livslängd

Garanti: 3 år

Beräknad livslängd: 5år

Övrig information

Madrassen förvaras plant, vikt eller rullpackad. Ska madrassen förvaras under en längre tid rekommenderar vi att madrassen förvaras plant.


Handhavande vid evakuering med Stratum Evakueringsöverdrag

- Fixera brukaren genom att spänna fast båda remmarna över brukaren
- Informera brukaren vad som händer
- Lås fast hjulen och sänk sängen till lägsta läge
- Dra därefter ner madrassen från sängen genom att greppa tag och dra i bärhandtagen på madrassens fotända.

Vid evakuering i trappa

- Gå baklänges tills madrassen har passerat första trappsteget.
- Vänd dig om och dra sedan brukaren i madrassens fotända

- Håll ett stadigt grepp i räcknet med ena handen och ett stadigt grepp i mitthandtaget med andra handen.

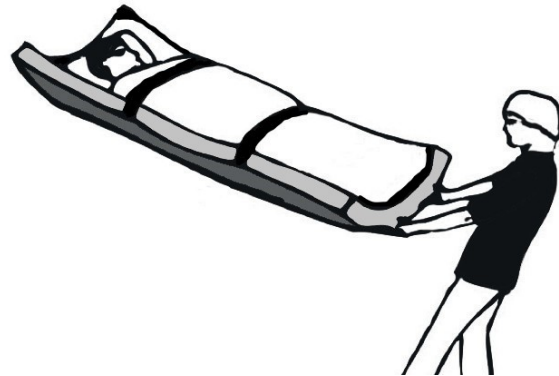

Tillverkare



Kontakt:

Telefon: 040 45 47 87

Fax: 040 45 47 99

E-post: info@comco.se

Postadress:

COMCO AB
Brädgårdsvägen 28
236 32 Höllviken

Godsadress:

COMCO AB
Radiatorvägen
Port 5-8
283 43 Osby

Support:

Helgfria vardagar 8.00-16.30