

COMCO


BRUKSANVISNING

Kilkudde med hygienöverdrag



STANDARD 100
2013LK0003
AITEK

www.oeko-tex.com

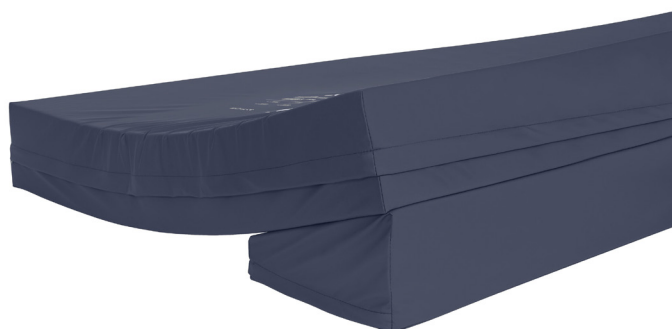

CE-Märkning

Kilkudden är CE-märkt enligt MDR (Medical Device Regulation) (EU) 2017/745 medicintekniska produktdirektivet klass 1. Med CE-märkning säkerställer COMCO AB att produkten uppfyller kraven i lagen om medicintekniska produkter. Enligt dessa föreskrifter är vi skyldiga att rapportera olyckor och tillbud som rör våra produkter. Vi ber er därför att rapportera till COMCO AB om en olycka eller tillbud inträffar som rör våra produkter.

Introduktion och användning

COMCOs kilkudde/stödkil är ett effektivt hjälpmedel för att positionera och avlasta brukare och kan användas i både liggande och sittande läge. Vid användning av en ersättningsmadrass upp till 14 cm placeras kilkudden under madrassen. Används en toppmadrass placeras den mellan toppmadrassen och underliggande madrass.

Kilkudden är lämpad för såväl vård- och omsorgsmiljö som hemmiljö.

Fakta Kilkudde

Kärna: Kallskum

Överdrag: Hygienöverdrag 200 g/m²

Färg: Mörkblå

Mått: 70x26x15/5 cm

Artikelnr: 7026155

Tillbehör

Hygienöverdrag, artikelnr TM-7026155

Rengöring och rekonditionering

Kuddens avtagbara hygienöverdrag ska rengöras och rekonditioneras för att undvika eventuell smittspridning. Etikett med tvättanvisningar är placerad på insidan av överdraget.

Det tvättas i max 95°C och kan även torktumlas. Använd en fuktig trasa med ett skonsamt rengöringsmedel för att rengöra ytan. Torka sedan av den fuktiga ytan med en torr trasa. Vid behov använd även desinfektionsmedel.

Destruering

Såväl kudde som emballage sorteras under brännbart avfall.

Retur och reklamationer

Alla avvikelser skall rapporteras till COMCO AB. Reklamation får göras först när avvikelserna är rapporterade till oss. Returering sker då enligt våra instruktioner. Vid transportskadat gods skall även anmälan göras till berört transportbolag. När reklamationen är COMCO tillhanda sker återrapportering till kunden gällande hur reklamationen skall åtgärdas.

Tillverkare

Kontakt

Telefon: 040 45 47 87

E-post: info@comco.se

Webbplats: www.comco.se

Support

Helgfria vardagar 8.00-17.00

Postadress

COMCO AB
Brädgårdsvägen 28
236 32 Höllviken

Godsadress

COMCO AB
Radiatorvägen, Port 5-8
283 43 Osby