

## BRUKSANVISNING

# Mjukfibernadrass



## Säkerhetsföreskrifter

- Läs föreskriften noggrant och spara den för framtida bruk.
- Stick inte in vassa föremål i madrassen.
- Använd endast madrassen för det den är avsedd till enligt instruktioner i denna manual.
- Undvik skador genom att hålla madrassen borta från varma källor eller eld.
- Placera madrassen noggrant och kontrollera att rätt storlek används.
- Madrassen ska användas så att den inte blir skadad eller klämd.

## CE-Märkning

COMCOs mjukfibernadrass är CE-märkt enligt MDR (Medical Device Regulation) (EU) 2017/745 medicintekniska produktdirektivet klass 1. Med CE-märkning säkerställer COMCO AB att produkten uppfyller kraven i lagen om medicintekniska produkter. Enligt dessa föreskrifter är vi skyldiga att rapportera olyckor och tillbud som rör våra produkter. Vi ber er därför att rapportera till COMCO AB om en olycka eller tillbud inträffar som rör våra produkter.

## Uppackning

Våra madrasser levereras rullpackade/komprimerade i återvinningsbar plast. Innan påbörjande av uppackning kontrollera att madrassen ej är skadad. Avlägsna sedan plasten försiktigt. Användning av vassa föremål vid öppnandet bör undvikas då man riskerar att skada madrassen. Efter avlägsnandet av plasten bör madrassen placeras ca 1-3 h i plant läge för att återhämta sin normala ursprungliga form. Madrassen går även att använda direkt efter uppackning.

## Introduktion & Användning

Mjukfibernadrassen placeras ovanpå en annan madrass och fixeras med hjälp av resårband som är placerade i varje hörn. Den är lämplig att använda i så väl vård- och omsorgsmiljö som hemmiljö. Madrassen är fylld med silkoniserad polyesterhålfiber, vars egenskaper ger en skön känsla och motverkar risken för skjuv.

## Fakta Mjukfibernadrass

**Fyllning:** Silkoniserad polyesterhålfiber

**Tyg:** Microfiber 104 g/m<sup>2</sup>

**Förpackning:** Rullpackad i klar plast

**Rekommenderad brukarvikt:** 0-75 kg

**Färg:** Vit

Etikett med leverantörsnamn, anvisningar om tvätt, brukarvikt, artikelnummer, storlek, samt tillverkningsdatum är placerad på madrassen.

Madrassen är Oeko-tex certifierad.

## Storlekar

80x200 cm, artikelnr STCOM080200

90x200 cm, artikelnr STCOM090200

105x200 cm, artikelnr STCOM105200

120x200 cm, artikelnr STCOM120200

Specialstorlekar kan även tillverkas efter önskemål.

## Tillbehör

**Madrasskydd/Hygienöverdrag** finns att beställa som tillbehör till madrassen. Överdraget är ångpermeabelt, men släpper inte igenom fukt/kroppsvätskor. Det träs över madrassen och har en resår runt om som gör att det sitter fast.

Madrasskydd/Hygienöverdrag finns i följande storlekar:

80x200cm, artikelnr HM-080200

90x200cm, artikelnr HM-090200

105x200cm, artikelnr HM-105200

120x200cm, artikelnr HM-120200

Specialstorlekar kan även tillverkas efter önskemål.

## Rengöring

Madrassen tvättas i 60°C (kan tvättas i fullängdsprogram i en tvättmaskin avsedd för hemmiljö) och kan även torktumlas på låg värme till stryktorr. Överdraget tvättas i upp till 90°C och kan även det torktumlas.

## Destruering

Såväl madrass som emballage sorteras under brännbart avfall.

## Retur och reklamationer

Alla avvikelser skall rapporteras till COMCO AB. Reklamation får göras först när avvikelsen är rapporterad till oss. Returering sker då enligt våra instruktioner. Vid transportskadat gods skall även anmälan göras till berört transportbolag. När reklamationen är COMCO tillhanda sker återrapportering till kunden gällande hur reklamationen skall åtgärdas.

## Garanti

Mjukfiber madrassen har 2 års garanti.

## Övrig information

Madrassen förvaras plant, vikt eller rullpackad. Ska förvaring ske under en längre tid rekommenderar vi att den förvaras plant.

## Tillverkare

### Kontakt

**Telefon:** 040 45 47 87

**E-post:** [info@comco.se](mailto:info@comco.se)

**Webbplats:** [www.comco.se](http://www.comco.se)

### Support

Helgfria vardagar 8.00-17.00

### Postadress

COMCO AB  
Brädgårdsvägen 28  
236 32 Höllviken

### Godsadress

COMCO AB  
Radiatorvägen, Port 5-8  
283 43 Osby