


BRUKSANVISNING

Solatium Basmadrass

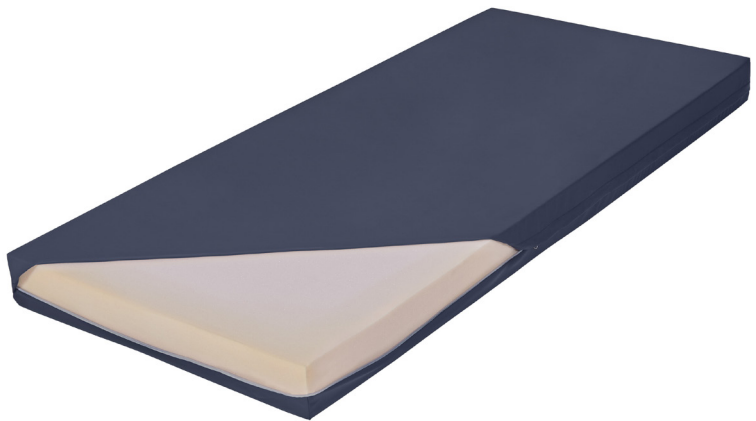

Säkerhetsföreskrifter

- Läs föreskriften noggrant och spara den för framtida bruk.
- Stick inte in vassa föremål i madrassen.
- Använd endast madrassen för det den är avsedd till enligt instruktioner i denna manual.
- Undvik skador genom att hålla madrassen borta från varma källor eller eld.
- Placera madrassen noggrant och kontrollera att rätt storlek används.
- Madrassen ska användas så att den inte blir skadad eller klämd.

CE-Märkning

Solatium Basmadrass är CE-märkt enligt MDR (Medical Device Regulation) (EU) 2017/745 medicintekniska produkt-direktivet klass 1. Med CE-märkning säkerställer COMCO AB att produkten uppfyller kraven i lagen om medicintekniska produkter. Enligt dessa föreskrifter är vi skyldiga att rapportera olyckor och tillbud som rör våra produkter. Vi ber er därför att rapportera till COMCO AB om en olycka eller tillbud inträffar som rör våra produkter.

Uppackning

Våra madrasser levereras rullpackade/komprimerade i återvinningsbar plast. Innan påbörjande av uppackning kontrollera att madrassen ej är skadad. Avlägsna sedan plasten försiktigt. Användning av vassa föremål vid öppnandet bör undvikas då man riskerar att skada madrassen. Efter avlägsnandet av plasten bör madrassen placeras i plant läge för att återhämta sin normala ursprungliga form. Madrassen går även att använda direkt efter uppackning.

Introduktion & Användning

Solatium Basmadrass placeras direkt på sängbotten och är lämpad för såväl vård- och omsorgsmiljö som hemmiljö. Den ger god komfort och avlastning och används främst av brukare med varierande grad av funktionsnedsättning. Madrassens avtagbara hygienöverdrag har dragkedja med droppskydd på tre sidor och är slitstarkt, avtorkningsbart och försett med bärhandtag.

Fakta Solatium Basmadrass

Fyllning: 12 cm Kallskum 35 kg/m³ (HR3532)

Hygienöverdrag: 200 g/m²

Förpackning: Rullpackad i klar plast

Rekommenderad brukarvikt: 0-130 kg

Färg: Mörkblå

Etikett med anvisningar om tvätt, brukarvikt, artikelnummer, artikelnamn, storlek, och tillverkningsdatum är placerad på insidan av hygienfodralet. Madrassen är Oeko-tex certifierad och har en beräknad livslängd på fem år.

Storlekar

80x200 cm, artikelnr S3512-080200

85x200 cm, artikelnr S3512-085200

90x200 cm, artikelnr S3512-090200

90x210 cm, artikelnr S3512-090210

105x200 cm, artikelnr S3512-105200

120x200 cm, artikelnr S3512-120200

Specialstorlekar kan även tillverkas efter önskemål.

Tillbehör

Evakueringsöverdrag finns att beställa som tillbehör till Solatium Basmadrass. Detta funktionella överdrag har kardborreföresedda remmar som enkelt dras ut från respektive långsida för att kunna fixera brukaren i en nödsituation, och handtag för att underlätta evakuering/förflyttning. Produkten är mönsterskyddad via European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

Evakueringsöverdraget finns i följande storlekar:

85x200cm, artikelnr TMEV-S12-085200
90x200cm, artikelnr TMEV-S12-090200
105x200cm, artikelnr TMEV-S12-105200

Specialstorlekar kan även tillverkas efter önskemål.

Rengöring och rekonditionering

Madrassens hygienöverdrag ska rengöras och rekonditioneras för att undvika eventuell smittspridning. Det tvättas i max 95°C och kan även torktumlas. Etikett med tvätthanvisningar är placerad på insidan av fodralet.

Använd en fuktig trasa med ett skonsamt rengöringsmedel för att rengöra ytan. Torka sedan av den fuktiga ytan med en torr trasa. Vid behov använd även desinfektionsmedel såsom DAX, Virkon, Perform eller andra vanligt förekomna upphandlade medel. Madrassens hygienöverdrag tål rengöring med alkoholbaserad ytdesinfektion innehållande tensider. Vid rengöring med klorin kan en koncentration på 1 000 ppm/0,1% användas.

Efter rengöring kontrollera hygienöverdraget. Är det skadat ska det bytas ut. Kontrollera i detta fall även att ingen vätska trängt ner till madrasskärnan.

Destruering

Såväl madrass som emballage sorteras under brännbart avfall.

Retur och reklamationer

Alla avvikelser skall rapporteras till COMCO AB. Reklamation får göras först när avvikelserna är rapporterade till oss. Returering sker då enligt våra instruktioner. Vid transportskadat gods skall även anmälan göras till berört transportbolag. När reklamationen är COMCO tillhanda sker återrapportering till kunden gällande hur reklamationen skall åtgärdas.

Garanti

Garanti: 3 år

Övrig information

Madrassen förvaras plant, vikt eller rullpackad. Ska förvaring ske under en längre tid rekommenderar vi att den förvaras plant.

Tillverkare

Kontakt

Telefon: 040 45 47 87

E-post: info@comco.se

Webbplats: www.comco.se

Support

Helgfria vardagar 8.00-17.00

Postadress

COMCO AB
Brädgårdsvägen 28
236 32 Höllviken

Godsadress

COMCO AB
Radiatorvägen, Port 5-8
283 43 Osby

