

BRUKSANVISNING

Solatium Heavy



Säkerhetsföreskrifter

- Läs föreskriften noggrant och spara den för framtida bruk.
- Stick inte in vassa föremål i madrassen.
- Använd endast madrassen för det den är avsedd till enligt instruktioner i denna manual.
- Undvik skador genom att hålla madrassen borta från varma källor eller eld.
- Placera madrassen noggrant och kontrollera att rätt storlek används.
- Madrassen ska användas så att den inte blir skadad eller klämd.

CE-Märkning

Solatium Heavy är CE-märkt enligt MDR (Medical Device Regulation) (EU) 2017/745 medicintekniska produktdirektivet klass 1. Med CE-märkning säkerställer COMCO AB att produkten uppfyller kraven i lagen om medicintekniska produkter. Enligt dessa föreskrifter är vi skyldiga att rapportera olyckor och tillbud som rör våra produkter. Vi ber er därför att rapportera till COMCO AB om en olycka eller tillbud inträffar som rör våra produkter.

Uppackning

Våra madrasser levereras rullpackade/komprimerade i återvinningsbar plast. Innan påbörjande av uppackning kontrollera att madrassen ej är skadad. Avlägsna sedan plasten försiktigt. Användning av vassa föremål vid öppnandet bör undvikas då man riskerar att skada madrassen. Efter avlägsnandet av plasten bör madrassen placeras i plant läge för att återhämta sin normala ursprungliga form. Madrassen går även att använda direkt efter uppackning.

Introduktion & Användning

Solatium Heavy används i vårdmiljöer och är anpassad för tyngre brukare. Madrassen placeras direkt på sängbotten. Det avtagbara, slitstarka hygienöverdraget har dragkedja med droppskydd på tre sidor och är avtorkningsbart och försett med bärhandtag.

Fakta Solatium Heavy

Fyllning: 15 cm skum 55 kg/m³

Överdrag: Hygienöverdrag 200 g/m²

Förpackning: Rullpackad i klar plast

Rekommenderad brukarvikt: 0-250 kg

Färg: Blå

Etikett med anvisningar om tvätt, brukarvikt, artikelnummer, artikelnamn, storlek, samt tillverkningsdatum är placerad på insidan av hygienfodralet.

Madrassen är Oeko-tex certifierad.

Storlekar

90x200x15 cm, artikelnr HESO-09020015

90x210x15 cm, artikelnr HESO-09021015

105x200x15 cm, artikelnr HESO-10520015

105x210x15 cm, artikelnr HESO-10521015

120x200x15 cm, artikelnr HESO-12020015

Specialstorlekar kan även tillverkas efter önskemål.

Rengöring

Madrassens överdrag ska rengöras och reconditioneras för att undvika eventuell smittspridning. Etikett med tvättanvisningar är placerad på insidan av fodralet. Hygienöverdrag tvättas i max 95 °C och kan även torktumlas.

Använd en fuktig trasa med ett skonsamt rengöringsmedel för att rengöra ytan. Torka därefter av den fuktiga ytan med en torr trasa. Vid behov använd även desinfektionsmedel.

Destruering

Såväl madrass som emballage sorteras under brännbart avfall.

Retur och reklamationer

Alla avvikelser skall rapporteras till COMCO AB. Reklamation får göras först när avvikelsen är rapporterad till oss. Retur-nering sker då enligt våra instruktioner. Vid transportskadat gods skall även anmälan göras till berört transportbolag. När reklamationen är COMCO tillhanda sker återrappor-tering till kunden gällande hur reklamationen skall åtgärdas.

Garanti

Solatium Heavy har 2 års garanti.

Övrig information

Madrasen förvaras plant, vikt eller rullpackad. Ska för-
varing ske under en längre tid rekommenderar vi att den
förvaras plant.

Tillverkare

Kontakt

Telefon: 040 45 47 87

E-post: info@comco.se

Webbplats: www.comco.se

Support

Helgfria vardagar 8.00-17.00

Postadress

COMCO AB
Brädgårdsvägen 28
236 32 Höllviken

Godsadress

COMCO AB
Radiatorvägen, Port 5-8
283 43 Osby