


BRUKSANVISNING

Solatium Maximal

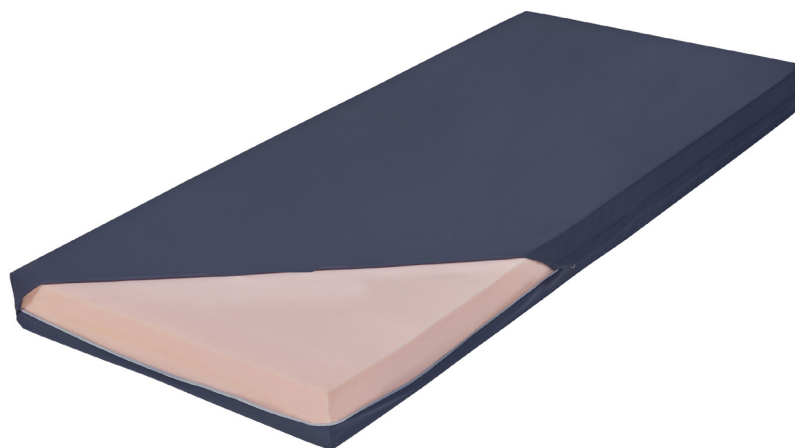

Säkerhetsföreskrifter

- Läs föreskriften noggrant och spara den för framtida bruk.
- Stick inte in vassa föremål i madrassen.
- Använd endast madrassen för det den är avsedd till enligt instruktioner i denna manual.
- Undvik skador genom att hålla madrassen borta från varma källor eller eld.
- Placera madrassen noggrant och kontrollera att rätt storlek används.
- Madrassen ska användas så att den inte blir skadad eller klämd.

CE-Märkning

Solatium Maximal är CE-märkt enligt MDR (Medical Device Regulation) (EU) 2017/745 medicintekniska produktdirektivet klass 1. Med CE-märkning säkerställer COMCO AB att produkten uppfyller kraven i lagen om medicintekniska produkter. Enligt dessa föreskrifter är vi skyldiga att rapportera olyckor och tillbud som rör våra produkter. Vi ber er därför att rapportera till COMCO AB om en olycka eller tillbud inträffar som rör våra produkter.

Uppackning

Våra madrasser levereras rullpackade/komprimerade i återvinningsbar plast. Innan påbörjande av uppackning kontrollera att madrassen ej är skadad. Avlägsna sedan plasten försiktigt. Användning av vassa föremål vid öppnandet bör undvikas då man riskerar att skada madrassen. Efter avlägsnandet av plasten bör madrassen placeras i plant läge

för att återhämta sin normala ursprungliga form. Madrassen går även att använda direkt efter uppackning.

Introduktion och användning

Solatium Maximal placeras direkt på sängbotten och är lämplig att använda i såväl vård- och omsorgsmiljö som hemmiljö. Madrassen har ett avtagbart överdrag med droppskyddad dragkedja på tre sidor, och är både slitstark och avtorkningsbar.

Fakta Solatium Maximal

Fyllning: 13 cm profilerad kallsaum 50 kg/m³

Förpackning: Rullpackad i klar plast

Rekommenderad brukarvikt: 0-150 kg

Färg: Mörkblå

Etikett med anvisningar om tvätt, brukarvikt, artikelnummer, artikelnamn, storlek, och tillverkningsdatum är placerad på insidan av madrassfodralet.

Storlekar

80x200x13cm, artikelnr MAX5013-080200

85x200x13cm, artikelnr MAX5013-085200

90x200x13cm, artikelnr MAX5013-090200

105x200x13cm, artikelnr MAX5013-105200

120x200x13cm, artikelnr MAX5013-120200

Specialstorlekar kan även tillverkas efter önskemål.

Rengöring och rekonditionering

Madrassens överdrag ska rengöras och rekonditioneras för att undvika eventuell smittspridning. Etikett med tvättanvisningar är placerad på insidan av överdraget.

Hygienöverdrag tvättas i max 95°C och kan även torktumlas. Använd en fuktig trasa med ett skonsamt rengöringsmedel för att rengöra ytan. Torka sedan av den fuktiga ytan med

en torr trasa. Vid behov använd även desinfektionsmedel.

Destruering

Såväl madrass som emballage sorteras under brännbart avfall.

Retur och reklamationer

Alla avvikelser skall rapporteras till COMCO AB. Reklamation får göras först när avvikelsen är rapporterad till oss. Returering sker då enligt våra instruktioner. Vid transportskadat gods skall även anmälan göras till berört transportbolag. När reklamationen är COMCO tillhanda sker återrapportering till kunden gällande hur reklamationen skall åtgärdas.

Garanti

2 års garanti.

Övrig information

Madrasen förvaras plant, vikt eller rullpackad. Ska förvaring ske under en längre tid rekommenderar vi att den förvaras plant.

Tillverkare

Kontakt

Telefon: 040 45 47 87

E-post: info@comco.se

Webbplats: www.comco.se

Support

Helgfria vardagar 8.00-17.00

Postadress

COMCO AB
Brädgårdsvägen 28
236 32 Höllviken

Godsadress

COMCO AB
Radiatorvägen, Port 5-8
283 43 Osby

