

## BRUKSANVISNING

# Stratum Sense Evakueringsmadrass




STANDARD  
100

www.oeko-tex.com



2013LK0003  
AITEK

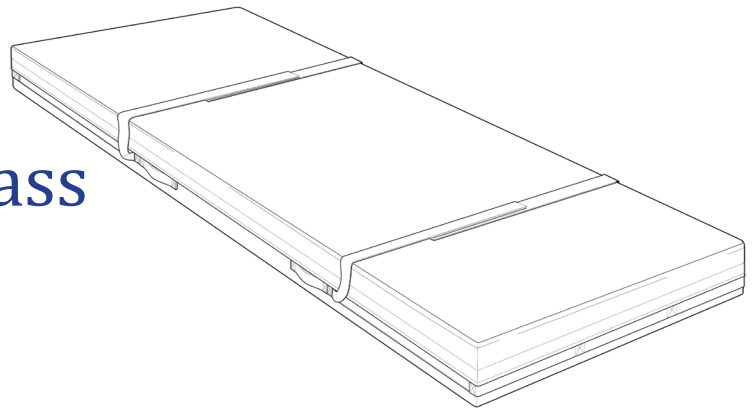

## Säkerhetsföreskrifter

- Läs föreskriften noggrant och spara den för framtida bruk.
- Stick inte in vassa föremål i madrassen.
- Använd endast madrassen för det den är avsedd till enligt instruktioner i denna manual.
- Undvik skador genom att hålla madrassen borta från varma källor eller eld.
- Placera madrassen noggrant och kontrollera att rätt storlek används.
- Madrassen ska användas så att den inte blir skadad eller klämd.

## CE-Märkning

Stratum Sense Evakueringsmadrass är CE-märkt enligt MDR (Medical Device Regulation) (EU) 2017/745 medicintekniska produktdirektivet klass 1. Med CE-märkning säkerställer COMCO AB att produkten uppfyller kraven i lagen om medicintekniska produkter. Enligt dessa föreskrifter är vi skyldiga att rapportera olyckor och tillbud som rör våra produkter. Vi ber er därför att rapportera till COMCO AB om en olycka eller tillbud inträffar som rör våra produkter.

## Uppackning

Våra madrasser levereras rullpackade/komprimerade i återvinningsbar plast. Innan påbörjande av uppackning kontrollera att madrassen ej är skadad. Avlägsna sedan plasten försiktigt. Användning av vassa föremål vid öppnandet bör undvikas då man riskerar att skada madrassen. Efter avlägsnandet av plasten bör madrassen placeras i plant läge för att återhämta sin normala ursprungliga form. Madrassen går även att använda direkt efter uppackning.

## Introduktion & Användning

Stratum Sense Evakueringsmadrass är en ersättningsmadrass som placeras direkt på sängbotten. Madrassen är utrustad med kardborreföresedda remmar som enkelt dras ut från respektive långsida för att kunna fixera brukaren i en nödsituation, och handtag för att underlätta evakuering/förflyttning. Produkten är mönsterskyddad via European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

Madrassen är utvecklad för att förebygga och som hjälpmedel vid behandling av trycksår upp t o m kategori 2. Den är uppdelad i olika zoner med extra bärighet när den används i ett uppfällt läge. Skumkärnan är profilerad, vilket skapar extra rörlighet. Skum och överdrag samverkar för att förhindra negativ påverkan av skjuvkrafter för brukaren.

## Fakta Stratum Sense Evakueringsmadrass

Profilerat högkvalitativt kallsaum, 52 kg/m<sup>3</sup>

**Överdrag:** Evakueringsöverdrag 200 g/m<sup>2</sup>

**Höjd:** 14 cm

**Förpackning:** Rullpackad i klar plast

**Rekommenderad brukarvikt:** 0-150 kg

**Färg:** Blå

Etikett med tillverkarens namn, tvätthanvisningar, rekommenderad brukarvikt, artikelnummer, artikelnamn, storlek, och tillverkningsdatum är placerad på insidan av överdraget. Tryckt på ovansidan av madrassen/överdraget är tillverkarens namn, produktnamn, lägesmärkning, artikelnummer, storlek, tillverkningsår, brukarvikt samt serienummer.

## Storlekar

85x200 cm, artikelnr EHR52-085200-14

85x210 cm, artikelnr EHR52-085210-14

90x200 cm, artikelnr EHR52-090200-14

90x210 cm, artikelnr EHR52-090210-14

105x200 cm, artikelnr EHR52-105200-14

105x210 cm, artikelnr EHR52-105210-14

120x200 cm, artikelnr EHR52-120200-14

Vid önskemål kan även specialstorlekar tillverkas.

## Tillbehör

Kilkudde i storlek 70x26x15/5 cm, artikelnr 7026155  
Förlängningsdel i 10 cm och 20 cm för samtliga storlekar  
Transportväska

## Rengöring och rekonditionering

Överdraget ska rengöras och rekonditioneras för att undvika eventuell smittspridning. Etikett med tvättnisningar är placerad på insidan av fodralet. Evakueringsöverdragets överdel tvättas i max 90°C, underdelen i max 70°C. Båda delarna kan även torktumlas.

Använd en fuktig trasa med ett skonsamt rengöringsmedel för att rengöra ytan. Torka sedan av den fuktiga ytan med en torr trasa. Vid behov använd även desinfektionsmedel såsom DAX, Virkon, Perform eller andra vanligt förekommande upphandlade medel. Madrassens överdrag tål rengöring med alkoholbaserad ytdesinfektion innehållande tensider. Vid rengöring med klorin kan en koncentration på 1 000 ppm/0,1% användas.

Efter rengöring kontrollera överdraget. Är det skadat ska det bytas ut. Vid skadat överdrag kontrollera även att ingen vätska trängt ner till madrasskärnan.

## Kontroll av madrass

Kontrollera att madrassöverdraget sitter korrekt på madrassen. Säkerställ att överdragets yta är hel samt inspektera sömmar och dragkedja. Reglera sängen så att höften är i nivå med madrassen.

Kontrollera skummet genom att lägga händerna ovan på varandra och pressa ner lätt i madrassen. Kontrollera hela madrassen, från huvudända till fotända och känn efter så att madrassen fjädrar tillbaka och att motstånd finns. Sviktar inte madrassen tillbaka när pressen lättar finns det risk att tryckdelande förmåga har försämrats. Är du osäker hur det ska kännas, jämför med hur en madrass känns som inte är använd eller genom att känna efter vid madrassens hörn (ungefär 20 cm från själva hörnet) där madrassen ej har blivit så hårt belastad. Det är normalt att belastade områden känns mjukare. Sängbotten ska inte kännas.

## Destruering

Såväl madrass som emballage sorteras under brännbart avfall.

## Retur och reklamationer

Alla avvikelser skall rapporteras till COMCO AB. Reklamation får göras först när avvikelserna är rapporterade till oss. Returering sker då enligt våra instruktioner. Vid transportskadat gods skall även anmälan göras till berört transportbolag. När reklamationen är COMCO tillhanda sker återrapportering till kunden gällande hur reklamationen skall åtgärdas.

## Garanti/Livslängd

Stratum Sense Evakueringsmadrass har 3 års garanti och en förväntad livslängd på 5 år.

## Övrig information


Madrassen förvaras plant, vikt eller rullpackad. Ska madrassen förvaras under en längre tid rekommenderar vi att den förvaras plant.

## Handhavande vid evakuering

- Fixera brukaren genom att spänna fast båda remmarna över brukaren.
- Informera brukaren om vad som händer
- Lås fast hjulen och sänk sängen till lägsta läge
- Dra därefter ner madrassen från sängen genom att greppa tag och dra i bärhandtagen på madrassens fotända.

### Vid evakuering i trappa

- Gå baklänges tills madrassen har passerat första trappsteget.
- Vänd dig om och dra sedan brukaren i madrassens fotända.
- Håll ett stadigt grepp i räcknet med ena handen och ett stadigt grepp i mitthandtaget med andra handen.

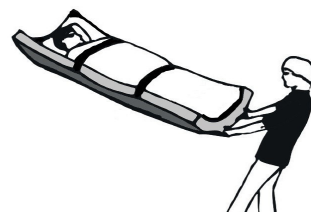

## Tillverkare

### Kontakt

**Telefon:** 040 45 47 87

**E-post:** info@comco.se

**Webbplats:** www.comco.se

### Support

Helgfria vardagar 8.00-17.00

### Postadress

COMCO AB  
Brädgårdsvägen 28  
236 32 Höllviken

### Godsadress

COMCO AB  
Radiatorvägen, Port 5-8  
283 43 Osby

