

BRUKSANVISNING

Stratum Sense



STANDARD 100
2013LK0003
AITEK
www.oeko-tex.com



Säkerhetsföreskrifter

- Läs föreskriften noggrant och spara den för framtida bruk.
- Stick inte in vassa föremål i madrassen.
- Använd endast madrassen för det den är avsedd till enligt instruktioner i denna manual.
- Undvik skador genom att hålla madrassen borta från varma källor eller eld.
- Placera madrassen noggrant och kontrollera att rätt storlek används.
- Madrassen ska användas så att den inte blir skadad eller klämd.

CE-Märkning

Stratum Sense är CE-märkt enligt MDR (Medical Device Regulation) (EU) 2017/745 medicintekniska produktdirektivet klass 1. Med CE-märkning säkerställer COMCO AB att produkten uppfyller kraven i lagen om medicintekniska produkter. Enligt dessa föreskrifter är vi skyldiga att rapportera olyckor och tillbud som rör våra produkter. Vi ber er därför att rapportera till COMCO AB om en olycka eller tillbud inträffar som rör våra produkter.

Introduktion

Våra madrasser levereras rullpackade/komprimerade i återvinningsbar plast. Innan påbörjande av uppäckning kontrollera att madrassen ej är skadad. Avlägsna sedan plasten försiktigt. Användning av vassa föremål vid öppnandet bör undvikas då man riskerar att skada madrassen. Efter avlägsnandet av plasten bör madrassen placeras i plant läge för att återhämta sin normala ursprungliga form. Madrassen går även att använda direkt efter uppäckning.

Användning

Stratum Sense är en ersättningsmadrass och placeras vid användning direkt på sängbotten. Madrassen är lämplig att använda i vård- och omsorgsmiljö samt i hemmiljö för att förebygga och som hjälpmedel vid behandling av trycksår till och med kategori 2. Dess skumkärna är försedd med trikåöverdrag för att madrass och överdrag ska samverka för att motverka negativ påverkan av skjuvkrafter för brukaren. Skummet är profilerat vilket skapar extra rörlighet för brukaren. Madrassen är uppdelad i olika zoner med extra bärighet när den används i ett uppfällt läge. Stratum Sense har droppskyddad dragkedja med ett avtagbart hygienöverdrag som är slitstarkt, elastiskt, vätsketätt, ångpermeabelt och avtorkningsbart.

Fakta Stratum Sense

Profilerat högkvalitativt kallsaum, 52 kg/m³

Hygienöverdrag 200 g/m²

Höjd: 14 cm

Förpackning: Rullpackad i klar plast

Rekommenderad brukarvikt: 0-150 kg

Färg: Blå

Etikett med anvisningar om bl a verantörsnamn, tvätt, brukarvikt, artikelnummer, artikelnamn, storlek, och tillverkningsdatum är placerad på tvättrådsetikett på insidan av hygienfodralet. Madrass och överdrag är även märkt med lägesmärkning, tillverkarens namn, produktnamn, artikelnummer, storlek, tillverkningsår, brukarvikt, serienummer, tvätthanvisning.

Storlekar

Stratum Sense med hygienöverdrag:

85x200 cm, artikelnr SS-08520014

85x210 cm, artikelnr SS-08521014

90x200 cm, artikelnr SS-09020014

90x210 cm, artikelnr SS-09021014

105x200 cm, artikelnr SS-10520014

105x210 cm, artikelnr SS-10521014

120x200 cm, artikelnr SS-12020014

Stratum Sense med evakueringsöverdrag:

85x200 cm, artikelnr EHR52-085200-14

85x210 cm, artikelnr EHR52-085210-14

90x200 cm, artikelnr EHR52-090200-14

90x210 cm, artikelnr EHR52-090210-14

105x200 cm, artikelnr EHR52-105200-14

105x210 cm, artikelnr EHR52-105210-14

120x200 cm, artikelnr EHR52-120200-14

Tillbehör

Tillbehör till Stratum Sense:

Hygienöverdrag

Hygienöverdrag med evakueringsfunktion

Kilkudde i storlek 70x26x15/5 cm

Förlängningsdel i 10 cm och 20 cm för samtliga storlekar

Transportväska

Rengöring och rekonditionering

Överdraget ska rengöras och rekonditioneras för att undvika eventuell smittspridning. Etikett med tvättanvisningar är placerad på insidan av hygienfodralet. Hygienöverdrag tvättas i max 90°C. Överdraget kan även torktumlas. Löstagbart hygienöverdrag klarar maskintvätt i 90°C med efterföljande torktumling med bibehållen märkning.

Använd en fuktig trasa med ett skonsamt rengöringsmedel för att rengöra ytan. Torka sedan av den fuktiga ytan med en torr trasa. Vid behov använd även desinfektionsmedel såsom DAX, Virkon, Perform eller andra vanligt förekommande upphandlade medel. Madrassens hygienöverdrag tål rengöring med alkoholbaserad ytdesinfektion innehållande tensider. Vid rengöring med klorin kan en koncentration på 1 000 ppm/0,1% användas.

Efter rengöring kontrollera hygienöverdraget. Är det skadat ska det bytas ut. Vid skadat hygienöverdrag kontrollera även att ingen vätska trängt ner till madrasskärnan.

Kontroll av madrass

Kontrollera att madrassöverdraget sitter korrekt på madrassen. Säkerställ att madrassöverdragets yta är hel samt inspektera sömmar och dragkedja. Reglera sängen så att höften är i nivå med madrassen. Kontrollera skummet genom att lägga händerna ovan på varandra och pressa ner lätt i madrassen. Kontrollera hela madrassen, från huvudända till fotända och känn efter så att madrassen fjädrar tillbaka och att motstånd finns. Sviktar inte madrassen tillbaka när pressen lättar finns det risk att tryckdelande förmåga har försämrats. Är du osäker hur det ska kännas, jämför med hur en madrass känns som inte är använd eller genom att känna efter vid madrassens hörn (ungefär 20 cm från själva hörnet) där madrassen ej har blivit så hårt belastad. Det är normalt att belastade områden känns mjukare. Sängbotten ska inte kännas.

Destruering

Stratum Sense samt emballage sorteras under brännbart avfall.

Retur och reklamationer

Alla avvikelser skall rapporteras till COMCO AB. Reklamation får göras först när avvikelserna är rapporterade till oss. Returering sker då enligt våra instruktioner. Vid transportskadat gods skall även anmälan göras till berört transportbolag. När reklamationen är COMCO tillhanda sker återrapportering till kunden gällande hur reklamationen skall åtgärdas.

Garanti/Livslängd

Garanti: 3 år

Beräknad livslängd: 5 år

Övrig information


Madrassen förvaras plant, vikt eller rullpackad. Ska madrassen förvaras under en längre tid rekommenderar vi att madrassen förvaras plant.

Handhavande vid evakuering med Stratum Evakueringsöverdrag

- Fixera brukaren genom att spänna fast båda remmarna över brukaren.
- Informera brukaren om vad som händer
- Lås fast hjulen och sänk sängen till lägsta läge
- Dra därefter ner madrassen från sängen genom att greppa tag och dra i bärhandtagen på madrassens fotända.

Vid evakuering i trappa

- Gå baklänges tills madrassen har passerat första trappsteget.
- Vänd dig om och dra sedan brukaren i madrassens fotända.
- Håll ett stadigt grepp i räcket med ena handen och ett stadigt grepp i mitthandtaget med andra handen.

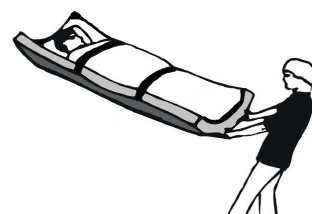

Tillverkare

Kontakt

Telefon: 040 45 47 87

E-post: info@comco.se

Webbplats: www.comco.se

Support

Helgfria vardagar 8.00-17.00

Postadress

COMCO AB
Brädgårdsvägen 28
236 32 Höllviken

Godsadress

COMCO AB
Radiatorvägen, Port 5-8
283 43 Osby